

**icare**  
**TONOVET**  
Plus



QUICK  
**GUIDE**  
快速指南




**NO ANESTHESIA**  
**NO CALIBRATION**

## 开机和安装探针


1. 长按选择键或测量键开机。下图为两种开机方式的介绍：  
记得套上腕带。




长按选择键

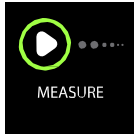

长按测量键




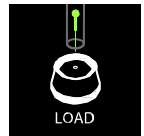


2. 打开探针筒的盖子，将探针装入眼压计的底座。（如图2所示）
3. 当显示屏出现如图3的标识，眼压计进入待测状态。

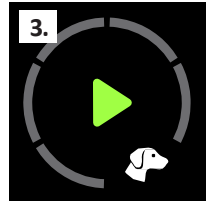

### 切换测量物种的方式：




按选择键进入菜单。按导航键并选择“设置”进入物种选择界面。按导航键至需要的物种后，按选择键确定改物种。选中物种后，按导航键即可回到待测界面。

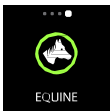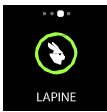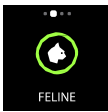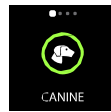



## 测量

1. 将眼压计靠近动物眼球附近（测量过程中不需要看显示屏，因为眼压计有声音提示测量成功与否，以及测量失败的原因提示）

测量时避免对动物过度施力，过度施力会影响眼压测量结果。对动物头部的保定应尽量轻柔。不要对动物的颈部或眼球施加压力。如果戴了项圈，确保项圈不会太紧，或测量时取下项圈。

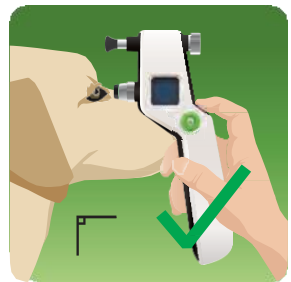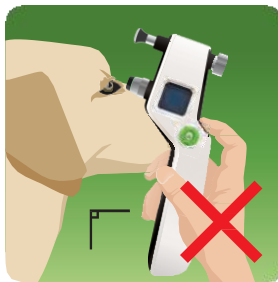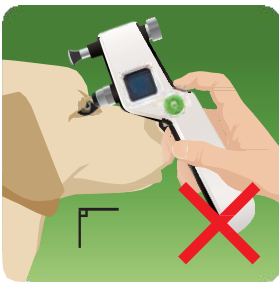

2. 测量时，探针应保持水平并且垂直于角膜中央。探针前端到角膜的距离应为 4-8mm（5/32 - 5/16 英寸）。探针底座指示灯为绿色才能测量（绿色表示探针已垂直于角膜）。

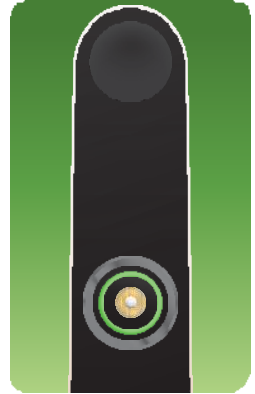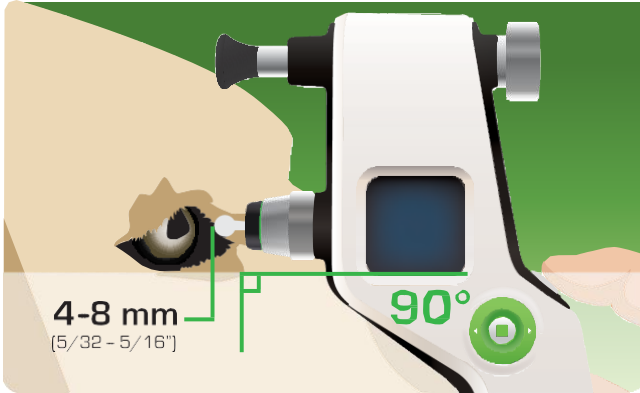

绿色  
指示灯


### 3. 按测量键开始眼压测量。

测量时探针会轻柔接触角膜；可以选择连测模式（长按测量键测完六次），或者单测模式（按一次测量键测一次眼压，需要按六次）。




- 一声短哔声 — 表示单次测量成功。
- 两声短哔声 — — 表示单次测量失败（报错信号及原因请参考使用手册完整版）。
- 一声长哔声 ————— 表示六次测量成功，最终眼压值在显示屏显示。

### 测量过程中显示屏内容

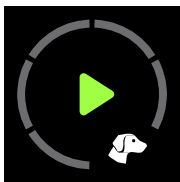

待测状态

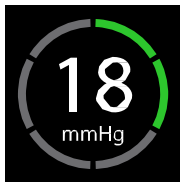

测量两次成功



测量六次成功



测量六次成功，但有轻微偏差\*




测量六次成功，但偏差太大\*\*

\* 如果结果超过 25mmHg, 建议重测。

\*\* 必须重测(六次后结果可能不会很高，但每次波动可能很大)。

## 眼压计的部件

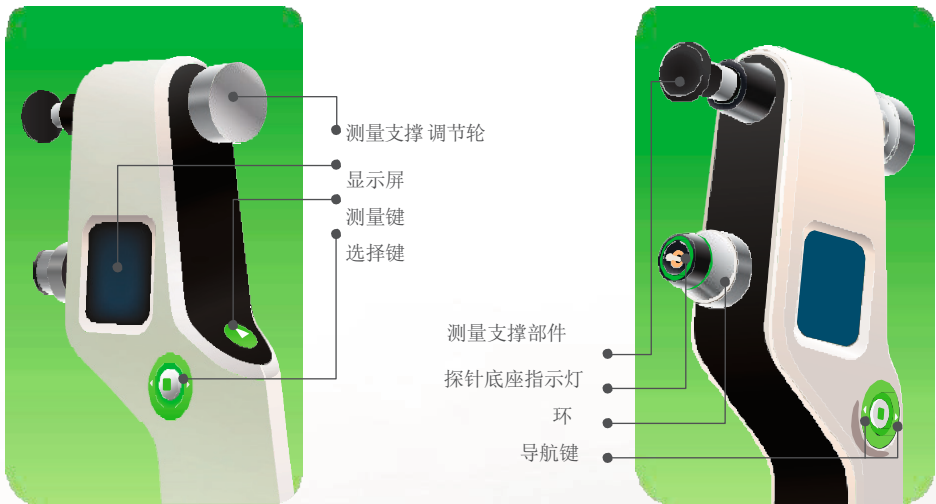

## 定期更换/清洗探针底座，以维护眼压计良好性能。

### 清洗探针底座

每 12 个月更换底座。每六个月清洗底座。当显示屏出现“清洁/更换”的报错提示时，请清洁或更换底座。清洗底座后，请确保底座完全干燥后再放回机器。

- 将 70-100% 异丙醇溶液倒入探针底座的清洗容器。
- 将眼压计关机。
- 拧开探针底座环，取出探针底座。
- 将探针底座放进清洗容器。
- 静置 5-30 分钟。
- 将探针底座取出。
- 用压缩气体吹入探针底座的细孔，以干燥和清除孔内溶液残留。或将探针底座自然放置 24 小时后再放回机器使用。
- 将探针底座放回眼压计。
- 拧回探针底座环，装好眼压计。

更详细的探针底座更换/清洗说明，请参考使用手册完整版。



[www.tonovet.com](http://www.tonovet.com)



如需了解更多信息  
请阅读说明书。



[www.tonovet.com/eifu](http://www.tonovet.com/eifu)